

ilem

MANUEL D'UTILISATION



ingenious  
living

Merci d'avoir acheté notre fauteuil releveur ILEM

Tous nos produits sont marqués **CE** en accord avec la norme 93/42/EEC-2007/47/EEC concernant les appareils médicaux.

Merci de lire ce manuel dans son intégralité avant toute utilisation.

Exemplaire à conserver

## AVERTISSEMENT

---

Assurez-vous d'avoir compris toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser le produit pour la première fois.

Si vous ne comprenez pas certains points de ce manuel:

- Consultez le revendeur ou un professionnel de la santé pour éviter tous les risques de dommages ou de blessure.
- Prenez conseil auprès de votre médecin ou thérapeute pour déterminer l'usage le plus adapté à vos besoins.

## GARANTIE

---

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pour une période de 2 ans pour le moteur et la structure, 1 an en ce qui concerne la télécommande et le tissu. Merci de garder votre reçu comme preuve d'achat.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par des réparations effectuées par des personnes non approuvées, ou liés aux points suivants:

- mauvais usage
- entretien et maintenance insuffisants ou inadéquats
- accidents
- usage commercial


Pendant la période de garantie, le produit sera pris en charge par un réparateur autorisé ou remplacé gratuitement.

## LIMITATION DES PIÈCES DE RECHANGE ET DES RÉPARATIONS

---

Les réparations de toute nature seront effectuées dans la limite des disponibilités des pièces de rechange.

## DESCRIPTIF PRODUIT

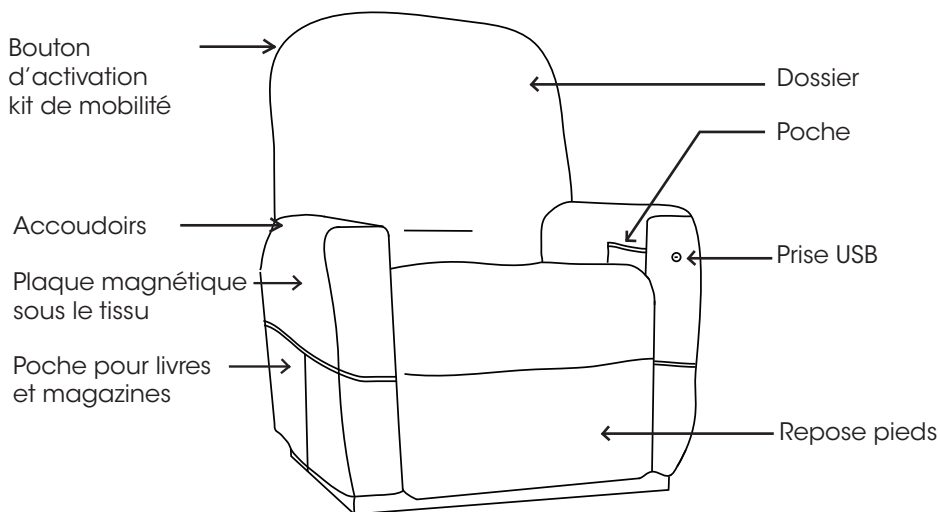

Kit de mobilité: Un système à verin électrique met le fauteuil sur 4 roues pour pouvoir le déplacer facilement.

Pour déplacer le fauteuil appuyez sur le bouton au dos du dossier. Le fauteuil s'élèvera et se mettra sur roulettes.

Lorsque vous avez amené le fauteuil à l'endroit souhaité, appuyez à nouveau sur le bouton au dos du dossier pour remettre le fauteuil au sol.

Ne pas s'asseoir sur le fauteuil quand l'option mobilité est activée.

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

Position allongée et relevée

Choix de 1 ou 2 moteurs (OKIN)

Télécommande intuitive avec bouton de retour à position initiale

Fauteuil léger et sur batterie

Prise chargeur USB

Chargeur de téléphone sans fil (en option)

Lampe de lecture intégrée (en option)

Poids maximum de l'utilisateur:  
150 kg (330 lbs)

Poids du produit: 55 kg (121lbs)

Matériaux: Tissu, acier, bois,  
mousse

Largeur totale: 84 cm

Largeur d'assise: 51 cm

Profondeur d'assise: 58 cm

Hauteur d'assise: 50 cm

Hauteur du dossier: 40 cm

## CONDITIONS D'UTILISATION


### 1. ASSEMBLAGE

Un fois le produit sorti de l'emballage assemblez le dossier et l'assise en suivant les instructions suivantes.

#### NOTE

L'assemblage nécessite deux personnes

- Connectez le dossier à la base du fauteuil.

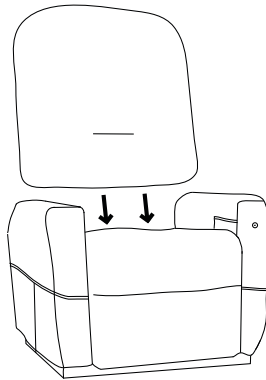

- Connectez les différents câbles partant du dossier du fauteuil à la boîte de contrôle située dans la base du fauteuil.

#### 1 moteur




1. En vous aidant des autocollants indicatifs, branchez le câble n°1 dans la prise correspondante.

2. En vous aidant des autocollants indicatifs, branchez le câble n°2 dans la prise correspondante.


3. Le câble n°3 est déjà branché

#### 2 moteurs

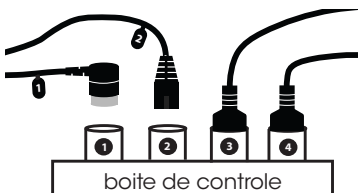

4. Si vous avez un fauteuil à 1 moteur vous n'avez pas besoin du câble n°4. Si vous avez un fauteuil 2 moteurs, le câble n°4 est déjà branché.

- Branchez la batterie située sous la boîte de contrôle:  
Branchez le câble n°5 dans la prise correspondante en vous servant des autocollants indicatifs.

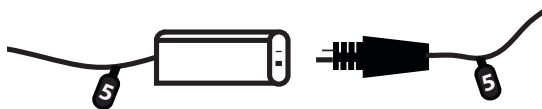

### ATTENTION

- Ne remplacez pas les pièces manquantes vous-même. Si une pièce est manquante contactez le magasin.
- En cas de pièces abimées, n'assemblez pas le fauteuil. Contactez le magasin.

## 2 . UTILISATION

Nos fauteuils releveurs permettent à l'utilisateur de se lever sans effort et sans danger.

### PRECAUTIONS D'USAGE

Si vous avez un des problèmes médicaux suivants, merci de consulter un professionnel de la santé avant utilisation:

- Vous souffrez d'une maladie cardiaque
- Vous portez un pacemaker
- Vous avez une tumeur
- Vous avez des problèmes de dos
- Vous récupérez d'une opération
- Vous prenez des médicaments
- Vous êtes enceinte

## ARRETEZ D'UTILISER LE FAUTEUIL SI:

Si un des cas suivant se produit débranchez immédiatement le fauteuil et déconnectez la batterie.


- De l'eau a été renversée sur le fauteuil
- Le rembourrage ou n'importe quelle autre partie du fauteuil est déchiré ou abimé
- Le fauteuil fonctionne mal
- Vous souffrez de douleurs abdominales durant l'utilisation

L'utilisateur peut ajuster la position du fauteuil grâce à la télécommande. Elle permet de sélectionner une des positions suivantes :

- Position relevée
- Position inclinée
- Position allongée
- Position assise (initiale)

Pour changer de position, pressez simplement le bouton correspondant et maintenez la pression jusqu'à atteindre la position désirée.


## TELECOMMANDE 3 BOUTONS (1 moteur)

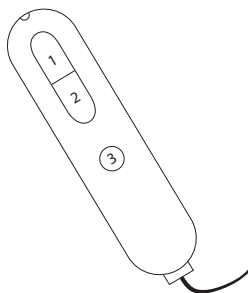

1. De la position allongée à la position relevée
2. De la position relevée à la position allongée
3. Retour à la position initiale

## TELECOMMANDE 5 BOUTONS (2 moteurs)

1. Redresser le dossier
2. Lever le fauteuil et descendre les repose pieds
3. Descendre le dossier
4. Descendre le fauteuil et remonter les repose pieds
5. Retourner à la position initiale

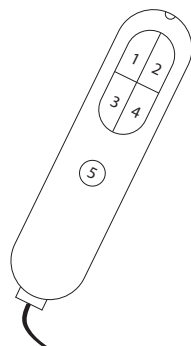


## POSITION INCLINEE

Avec cette position l'utilisateur peut abaisser partiellement le dossier et remonter les repose pieds de manière à être dans une position à moitié allongée.

## POSITION RELEVÉE


Le fauteuil se lève et s'incline vers l'avant pour permettre à l'utilisateur de se lever plus facilement.

Cette hauteur étant aussi adaptée à l'assise vous pouvez laisser le fauteuil dans cette position pour la prochaine utilisation.

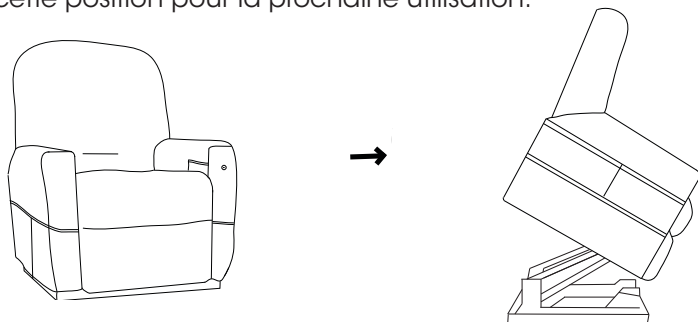


## POSITION ALLONGÉE

Cette position permet à l'utilisateur de s'allonger complètement dans le fauteuil. Le repose pieds et le dossier sont alors dans une position semi horizontale.

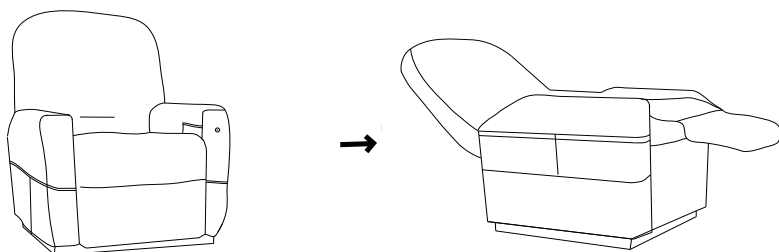

## POSITION PERSONNALISÉE (Seulement pour les fauteuils 2 moteurs)

Le dossier et le repose pieds sont motorisés, vous pouvez donc les ajuster indépendamment.

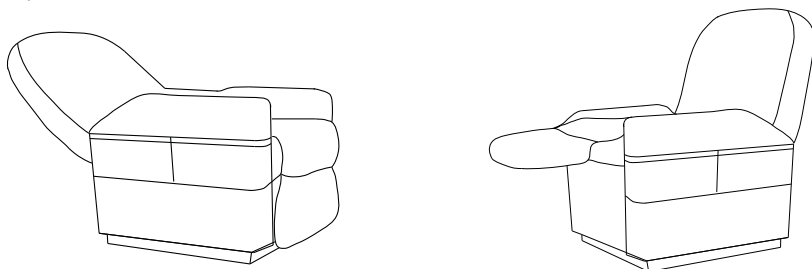


Incliner le dossier sans redresser le repose pieds

Redresser le repose pieds sans incliner le dossier

## PRISE USB DE CHARGEMENT

Pour charger votre appareil, branchez un câble USB standard dans la prise.

Ne pas forcer lors du branchement du câble. Lors de la charge, la LED autour de la prise sera bleu.

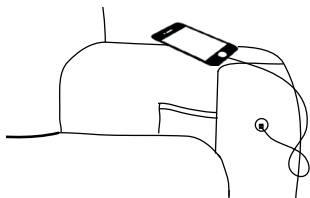

### NOTE

- Gardez la prise éloignée de l'eau ou d'autres liquides. Une utilisation inappropriée pourrait être dangereuse pour l'utilisateur.
- N'utilisez pas la prise si elle a été mouillée ou abîmée.
- Ne l'utilisez pas à d'autres buts que ceux prévus.

## KIT DE MOBILITE

Le kit de mobilité permet un déplacement facile du fauteuil. Veuillez vous reporter à la page 2 pour plus d'informations.

### NOTE


- Après chaque utilisation, vérifiez que le fauteuil fonctionne correctement et que toutes les vis sont correctement serrées.
- Avant utilisation vérifiez qu'il y ait un espace de plus de 58 cm derrière le fauteuil et plus de 30 cm devant.



## ATTENTION

Pour des raisons de sécurité:

- Ne pas soulever le fauteuil quand il est dans une position allongée ou inclinée.
- Après utilisation, toujours remettre le fauteuil dans la position assise. Ne pas s'asseoir sur les accoudoirs ou le repose pieds.
- Ne pas utiliser si plusieurs personnes sont assises sur le fauteuil ou si quelqu'un est assis sur vos genoux.
- Ne pas appuyer sur le dossier ou les repose pieds quand vous vous asseyez. Le fauteuil risquerait de se renverser.
- Toujours débrancher la télécommande avant de ramasser des objets qui seraient tombés sous le fauteuil.
- Ne pas laisser des enfants utiliser le fauteuil ou s'y asseoir sans surveillance. S'assurer que les mains et jambes des enfants soient à une distance raisonnable des repose pieds et du mécanisme.
- Ne pas utiliser le produit sous des couvertures ou oreillers. Un chauffage excessif pourrait survenir et causer un choc électrique ou des blessures.
- Ne pas tirer le fauteuil par le câble d'alimentation ni l'utiliser comme poignée.
- Ne pas exposer le fauteuil au soleil, fours, chauffages ou tout autres types de chaleur.
- Ne pas utiliser ce fauteuil avec d'autres matériel thérapeutique ou de beauté comme des tapis de massage, appareils de fitness ou couverture électrique.
- Ne pas utiliser le produit pendant au moins 2 heures si le fauteuil est exposé à une fort variation de chaleur.

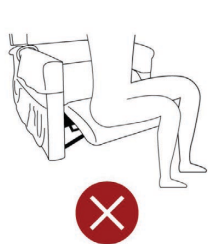

## SECURITE ET ENTRETIEN

---

- Première utilisation

- Avant la première utilisation vérifier que les composants du produit soient en bonne condition et intacts.

- Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas le produit et amenez le chez un réparateur agréé.

- Poids maximum utilisateur

N'utilisez pas le fauteuil si vous pesez plus que le poids maximum utilisateur (150 kg / 330 lbs).

- Contrôles réguliers

Contrôlez régulièrement la condition du produit. Si certains composants sont manquants, abimés ou cassés, ils doivent être remplacés immédiatement par un agent approuvé.

- Nettoyage

- Nettoyer régulièrement avec une éponge humide et du savon doux.

- Essuyer avec un chiffon doux et sec.

- Ne pas utiliser de brosse, de produits abrasifs ou de poudre à récurer.

## CERTIFICAT DE GARANTIE

---

Nom de famille:

Prénom(s):

Adresse:

Code Postal:

Ville:

Date de première utilisation:

Modèle:

Numéro de série:

Tampon du distributeur:

Merci de considérer l'environnement en utilisant le point de recyclage approprié pour ce produit et son emballage.

Un produit de

ingenious  
living

Unit B3, 7/F, Yip Fung Industrial Building,  
28 - 36 Kwai Fung Crescent,  
Kwai Chung, N.T., Hong Kong

Ref.V1

Dernière mise à jour le 10 avril 2017



Afin d'améliorer la qualité de nos produits cette notice  
est sujette à modification sans préavis.